

GMS Markeringsvæske - Anvendelsesinstruktioner

1. Rengør det område, der skal markeres på instrumentet, med en spritserviet for at fjerne eventuelle rester.
[Bortskaffelse af spritserviet skal følge din bortskaffelse af farligt affald.]

Lad tørre.

2. Ryst GMS-væsken grundigt, indtil du kan høre kuglelejet inde i flasken (bemærk, dette kan tage op til 1 minut ved grundig rystning, hvis væsken ikke har været benyttet i noget tid).

Sørg også for, at der ikke er sediment i bunden af flasken før påføring.

3. Påfør et tyndt, jævnt lag GMS-væske ved hjælp af den lille pensel, der følger med i låget og forsegl flasken. Lad tørre grundigt, hvilket er indikeret ved, at overfladen skifter fra blank til mat.
4. Placer instrumentet i griberen, og pas på ikke at beskadige overfladen med den påførte væske.

Vælg og kød den relevante MarkMaster-skabelon i overensstemmelse med laservejledningen. Laseren smelter den tørrede væske til metallet nedenunder, hvilket gør mærket permanent.

Fjern instrumentet fra griberen.

Rens det overskydende GMS-væske væk, der ikke er bundet til instrumentet, ved at tørre det af med en spritserviet.

[Bortskaffelse af serviet skal følge din bortskaffelse af farligt affald].

5. Registrer instrumentbeskrivelsen og GS1-serienummeret på instrumentets sporingssystem efter behov.
6. Returner instrumentet, der skal vaskes.
7. Gå tilbage til trin 1 for efterfølgende instrumenter.

