

GMS Märkningsvätska - Användningsinstruktioner

1. Rengör området som ska markeraspå instrumentet med en alkoholservett för att ta bort eventuella rester.

[Kassering av servetten måste följa era riktlinjer för hantering av farligt avfall]

Låt torka.

2. Skaka GSM-vätskan noggrant tills du kan höra kullagret inuti flaskan (Observera att det kan ta upp till en minut av kraftig skakning om vätskan har lämnats länge).

Se också till att inget sediment är i botten av flaskan före applicering.

3. Applicera ett tunt, jämnt lager av GSM-vätskan med den lilla penseln som finns i locket och återförslut flaskan. Låt torka ordentligt, vilket indikeras av att ytan vänder från en glansig till en matt yta.

4. Placera instrumentet i hållaren och se till att inte skada ytan med den påförda vätskan.

Välj och kör lämplig MarkMaster-mall i linje med laserinstruktionsmanualen. Lasern smälter den torkade vätskan till metallen under och gör märket permanent.

Ta bort instrumentet från hållaren.

Rengör överskottet av GSM-vätska som inte har bundits till instrumentet genom att torka av det med ett rengöringsmedel eller alkoholservett.

[Kassering av servetten måste följa er riktlinjer för hantering av farligt avfall]

5. Registrera instrumentbeskrivningen och GS1-serienumret på instrumentets spårningssystem vid behov.
6. Diska instrumentet.
7. Upprepa steg 1 – 6 för efterföljande instrument.

